

**INDICATIONS :** Entorses externes bénignes à moyennes, instabilité chronique de la cheville, reprise d'activité sportive.

**SPÉCIFICITÉS :** L'ERGOstrap™ SPORT maintient et stabilise votre cheville sans entraver le mouvement, grâce à l'action combinée des renforts thermoformables au niveau des malléoles et du strapping breveté EPITHELIUMFLEX®.

**ERGONOMIE :** L'ERGOstrap™ SPORT (- de 120g) a été conçu pour le sport. Adapté à votre morphologie et extra fin, il est très confortable et peut se porter dans tous types de chaussures.

**INDICATIES:** Lichte tot matige verstuikingen, chronische enkelinstabiliteit, hervatten van sportactiviteit.

**BIJZONDERE KENMERKEN:** De ERGOstrap™ SPORT ondersteunt en stabiliseert de enkel zonder de beweeglijkheid ervan te beperken, dankzij de gecombineerde werking van thermovormbare verstevigingselementen aan de enkels en de gepatenteerde EPITHELIUMFLEX® strapping.

**ERGONOMIE:** De ERGOstrap™ SPORT (<120g) is speciaal ontworpen om te sporten. Hij is perfect aangepast aan de vorm van uw voet, zit heel comfortabel en kan in elk type schoen worden gedragen.

## CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE POUR UN MAINTIEN OPTIMAL VEDERLICHTE TECHNOLOGIE VOOR EEN OPTIMALE ONDERSTEUNING



**RENFORTS THERMOFORMABLES** Les renforts latéraux semi-rigides deviennent souples quand vous immergez l'ERGOstrap™ dans l'eau chaude. Ils prennent la forme de vos malléoles lorsque vous l'enfilez et la conservent une fois l'orthèse refroidie.

**THERMOVORMBARE VERSTEVIGINGSELEMENTEN** De half-flexibele zijdelingse verstevigingen worden soepel wanneer u de ERGOstrap™ onderdompelt in heet water. Wanneer u de orthese aantrekt nemen de verstevigingen bij het afkoelen de vorm van uw enkels aan.



**STRAPPING EPITHELIUMFLEX®** Le strapping breveté intègre un tendon en silicone EPITHELIUMFLEX® permettant de limiter les mouvements provoquant l'entorse tout en garantissant le déroulé normal du pas.

**EPITHELIUMFLEX® STRAPPING** De gepatenteerde EPITHELIUMFLEX® strapping bevat een siliconen pees die de bewegingen die tot een verstuiking kunnen leiden beperkt zonder de normale stapbewegingen te hinderen.

**CONTRE-INDICATIONS :** Ne pas utiliser en cas d'arthrite, de diabète, de polynevrite, de neuropathie des membres inférieurs.

**COMPOSITION :** 50 % tissu polyamide/élasthanne, 32 % plastique thermoformable, 18 % silicone.

**CONTRA-INDICATIES:** Niet gebruiken ingeval van artritis, diabetes, polyneuropathie, zenuwaandoeningen aan de onderste ledematen.

**SAMENSTELLING:** 50% polyamide/elastaan, 32% thermovormbaar plastic, 18% silicone.

**Comment choisir votre taille?** Mesurez la circonférence de votre cheville au-dessus des malléoles en position assise. **Hoe kiest u uw maat?** Meet de omtrek van uw enkel boven de malleolus (knobbel).

| S                                                                                                  | M                                                                                                  | L                                                                                                    | XL                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18,5 <  ≤ 20 cm | 20 <  ≤ 21,7 cm | 21,7 <  ≤ 23,4 cm | 23,4 <  ≤ 25 cm |

L'ERGOstrap™ SPORT peut se porter indifféremment sur la cheville droite ou gauche.

U kunt de ERGOstrap™ SPORT zowel aan de rechter- als aan de linkerenkel dragen.