

LAMIDERM Crème

Samenstelling

Gezuiverd water, ethyleenglycolstearaat, paraffine dun vloeibaar, pentaandiol, stearinezuur, vaste paraffine, perhydrosqualeen, avocado-olie, natriumalginaat, trolamine, cetylpalmitaat, kaliumsorbaat, parfum honelia

Wanneer gebruiken

- Cutaan gebruik
- Bij 1e en 2e graads brandwonden, zonnebrand en niet-geïnfecteerde wonden
- Bij roodheid van de huid door radiotherapie.

Gebruiksaanwijzing

Opening van de tube

Bij het eerste gebruik, de verzegeling van de tube doorprikken met de bovenkant van de dop.

- 1e graads brandwonden en zonnebrand

Breng Lamiderm aan in een dikke laag en laat indringen zonder te wrijven.

Dit 2 à 4 maal per dag herhalen.

- 2e graads brandwonden en niet-geïnfecteerde wonden

Breng na reinigen van de brandwonde of de niet-geïnfecteerde wonde een dikke laag Lamiderm aan en doe dit meerdere malen per dag. Als nodig afdekken met een vochtig kompres. Gebruik geen droog absorberend verband.

- Roodheid van de huid door radiotherapie

Breng dagelijks 2 à 3 maal Lamiderm aan volgens de aanbevelingen van de dokter en laat indringen door een lichte massage.

Voorzorgen voor gebruik

Niet gebruiken:

- Bij een bloedende wonde
- Bij een geïnfecteerde wonde

Dit medisch hulpmiddel biedt geen zonnebescherming.

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid aan één van de bestanddelen van dit product.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren in de doos, beschermd tegen warmte.

De uiterste gebruiksdatum die duidelijk vermeld staat op de verpakking en de tube niet overschrijden.

Eigenschappen

Tube van 60 ml.

Datum van herziening: 07/2016

Distributeur: Qualiphar N.V./S.A.

Rijksweg 9

B-2880 Bornem

Fabrikant: Gifrer Barbezat

8 -10 rue Paul Bert

69150 DECINES CHARPIEU – FRANCE

CE1370