

## MERCUROCHROME PROTECTEUR OIGNON TISSU - 3790409

---

### FR

#### ➤ Description

Idéal pour hallux valgus. Protège des chocs. Soulage la douleur.

#### ➤ Conseils d'utilisation et précautions d'emploi

Le protecteur convient à la fois au pied gauche et au pied droit. Il doit être appliqué sur une peau propre et sèche. Enfiler le protecteur oignon comme une chaussette : glisser le gros orteil dans la partie la plus étroite du protecteur et les autres orteils dans la partie la plus large. Bien ajuster pour que le coussinet en gel épouse l'oignon. Après utilisation, laver le protecteur oignon au savon et à l'eau tiède. Puis, laisser le sécher à l'air libre.

Utiliser ce produit maximum 16 heures par jour. Ne pas utiliser sur des plaies cutanées. Usage externe. Laisser hors de portée des enfants. En cas de DIABETE ou de troubles circulatoires des membres inférieurs, demander l'avis d'un professionnel avant utilisation. En cas de douleurs persistantes, consulter un médecin. Si le produit cause un inconfort, une rougeur cutanée ou une augmentation de la douleur, stopper l'utilisation du produit et consulter un médecin.

### NL

#### ➤ Beschrijving

Ideaal voor hallux valgus. Beschermt tegen schokken. Verlicht de pijn.

#### ➤ Gebruiksadviezen en voorzorgsmaatregelen

De beschermer is geschikt voor zowel de linker- als de rechtervoet. Hij moet worden aangebracht op een schone en droge huid. Trek de hallux valgus beschermer aan als een sok: laat de grote teen door het smalste gedeelte van de beschermer glijden en de andere tenen door het breedste gedeelte. Laat de beschermer goed aanpassen, zodat het gelkussen rust op de hallux valgus. Na gebruik moet u de hallux valgus beschermer uitwassen met een mengsel van zeep en lauw water. Laat hem vervolgens aan de lucht drogen.

Gebruik dit product maximum 16 uur per dag. Niet gebruiken op huidwonden. Uitwendig gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Win het advies in van een zorgverlener voor gebruik van het product in het geval van DIABETES of stoornissen met de bloedsomloop van de onderste ledematen. Raadpleeg een arts in het geval van aanhoudende pijn. Als het product hinder, roodheid van de huid of een verhoogde pijn veroorzaakt, moet u het gebruik van dit product stopzetten en een arts raadplegen.