

MERCUROCHROME TALONNETTES T2 - 3790433

FR

➤ Description

Spécialement conçues pour le confort des pieds au quotidien, **les Talonnettes des Laboratoires Mercurochrome®** apportent support et stabilité aux talons. Leur matière amortit les chocs et les pressions afin de rendre la marche plus agréable. Ce produit est lavable et réutilisable.

➤ Conseils d'utilisation et précautions d'emploi

La talonnette convient à la fois au pied gauche et au pied droit. Placer la talonnette en veillant à poser la partie arrondie à l'arrière de la chaussure, face brillante côté semelle. La dépression doit être apparente. Nettoyer les talonnettes après utilisation à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher à l'air libre.

Ne pas utiliser sur des plaies cutanées. Usage externe. Laisser hors de portée des enfants. En cas de DIABETE, de troubles circulatoires des membres inférieurs ou de problèmes de posture, demander l'avis d'un professionnel avant utilisation. En cas de douleurs persistantes, consulter un médecin. Si le produit cause un inconfort, une rougeur cutanée, ou une augmentation de la douleur, stopper l'utilisation du produit et consulter un médecin. Une exposition à la lumière du soleil peut faire varier la couleur d'origine du produit.

NL

➤ Beschrijving

Deze kussentjes werden speciaal ontwikkeld voor het comfort van uw voeten in uw dagelijkse taken, **de Hielkussentjes van Laboratoires Mercurochrome®** zorgen voor ondersteuning en stabiliteit aan de hielen. Hun materiaal verzacht de schokken en de druk om uw stappen te verzachten. Dit product kan worden gewassen en is herbruikbaar.

➤ Gebruiksadviezen en voorzorgsmaatregelen

Het hielkussentje is geschikt voor zowel de linker- als de rechterschoen. Plaats het hielkussentje en let erop dat het afgeronde gedeelte zich aan de achterkant van de schoen bevindt, de glanzende zijde moet naar de zool worden gericht. De indrukking moet zichtbaar zijn. Maak de hielkussentjes na gebruik schoon met een zeepsopje, spoel af en laat aan de lucht drogen.

Niet gebruiken op huidwonden. Uitsluitend extern gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Win het advies in van een zorgverlener voor gebruik van het product in het geval van DIABETES, stoornissen met de bloedsomloop van de onderste ledematen of problemen met uw houding. Raadpleeg een arts in het geval van aanhoudende pijn. Als het product hinder, roodheid van de huid of een verhoogde pijn veroorzaakt, moet u het gebruik van dit product stopzetten en een arts raadplegen. Blootstelling aan de zon kan de kleur van het originele product doen verschillen.